



Quicking
Pet Rapid Test

Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Test de Prueba Rápida

EHRLICHIA Ab

Tipo de muestra: Suero / Plasma / Sangre total

Detecta: Anticuerpos

Componentes del Kit

10 bolsas de aluminio, cada una contiene:

- 1 casete de prueba
- 1 pipeta desechable
- 1 desecante

- 1 buffer de ensayo (5,0 ml)
- 10 pipetas desechables
- 10 tubos centrífugos
- Inserto del producto (instrucciones de uso)

- **Tiempo de obtención de resultados**
15 a 20 minutos

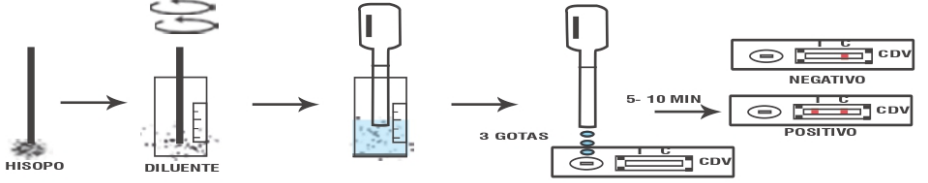
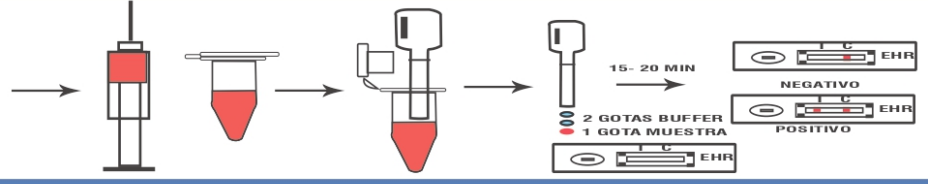
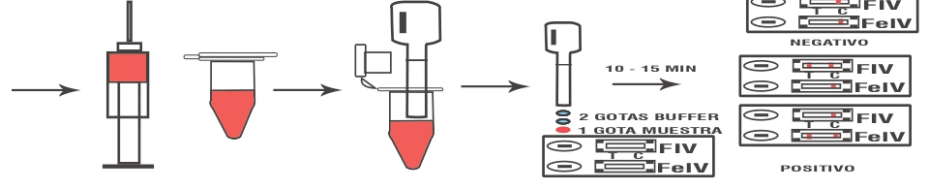
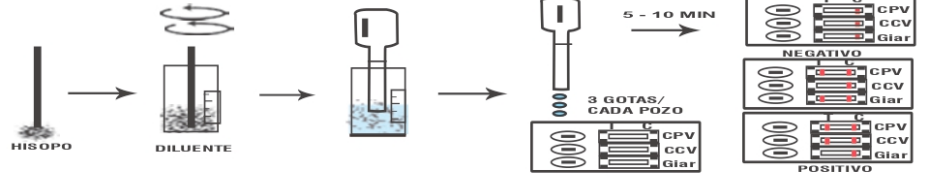


**Resultados rápidos
y confiables**



**Registro ICA
N° 10484-BV**

Guía de Pruebas Rápidas Veterinarias

PRUEBA	TIPO DE MUESTRA	DETECTA	PROCEDIMIENTO	TIEMPO DE LECTURA (min)
 PARVOVIRUS Ag	Materia fecal	Antígeno		5-10
 DISTEMPER MOQUILLO Ag	Secreciones (nasal/ocular) Suero	Antígeno		5- 10
 EHRlichia Ab	Suero / Plasma / Sangre total	Anticuerpos		15 - 20
 FIV Ab +FELV Ag	Suero / Plasma / Sangre total	Ag (virus de leucemia felina) Ac (virus de inmunodeficiencia felina)		10 - 15
 PARVO + CORONA + GIARDIA Ag	Materia fecal	Antígeno		5- 10



QUICKING BIOTECH CO., LTD.

MÉTODO DE ANÁLISIS

PRUEBA DE EHRlichia CANIS Ab

1. Especificaciones

CAT. No. : W81132

Principio: Ensayo inmunocromatográfico usando el método sándwich directo ----Monoclonal anti-Ehrlichia (Captura) -Monoclonal anti-Ehrlichia (Detector)

Propósito: La detección de anticuerpos contra Ehrlichia canis

Muestras: Suero , plasma o sangre total

Tiempo de lectura: 15 – 20 minutos

Sensibilidad: 96.08% vs. IFA

Especificidad: 97.30% vs IFA

Vida útil: 18 meses

Temperatura de almacenamiento: 2 ~ 30 °c

Tamaño del embalaje: 10 Pruebas / Kit

2. Características especiales

Alta sensibilidad y especificidad : 96.08% y 97.30 %

Excelente herramienta para predecir el pronóstico de un perro infectado

(Intensidad de la línea de prueba débil indica una disminución de la carga viral)

Un paso procedimiento de prueba: Fácil de usar, ahorrando tiempo y mano de obra

No se requiere ningún equipo adicional.

3. Evaluación

Estudio de Sensibilidad y especificidad comparando con otra marca comercial de prueba rápida

Quicking prueba rápida de Ehrlichia Ab fue evaluada con muestras clínicas positivas y negativas, confirmada por signos clínicos y exámenes complementarios con los principales kit comerciales de pruebas rápidas para detección de anticuerpos de Ehrlichia Canis.

	Condición		Total
	Positivo	Negativo	
Prueba positiva	49	1	50
Prueba negativa	2	36	38
Total	51	37	88

Los resultados de esta comparación entre la prueba rápida Quicking de anticuerpos anti Ehrlichia muestran una sensibilidad del 96.08% y una especificidad de 97.30%.

Zhongren Zhou
Technical Manager



Quicking
Pet Rapid Test



Equipos e Insumos Médicos Veterinarios