



El Otoscopio Inalámbrico Firefly DE571 Vet permite la inspección amplificada del oído externo, conducto auditivo y membrana timpánica. Compatible con iOS y Android, transmite video en vivo vía Wi-Fi y permite captura de fotos y videos desde la aplicación Firefly Pro.



Firefly DE571 Vet

OTOSCOPIO DIGITAL INALÁMBRICO

APLICACIONES

- ✔ Uso veterinario en consulta general y otología.
- ✔ Educación y demostración de casos clínicos.
- ✔ Iluminación de fosas nasales y garganta.

CONTENIDO DEL SISTEMA

- ✔ Otoscopio Firefly DE571 inalámbrico.
- ✔ Cable de carga USB.
- ✔ Adaptador de corriente 100-240V AC 5V USB.
- ✔ Clip de sujeción.
- ✔ Espéculos veterinarios de un solo uso (3 mm, 4 mm, 5 mm y 7 mm).

COMPATIBILIDAD

- ✔ iOS 9.3 o superior.
- ✔ Android 4.4 o superior en teléfonos y 6.0 o superior en tabletas.

LIMPIEZA

- ✔ Limpieza exterior con paño sin pelusa y solución alcohólica.
- ✔ No aplicar líquidos sobre las lentes.
- ✔ No sumergir ni esterilizar por vapor o agentes químicos.
- ✔ Espéculos de un solo uso, no reutilizables.

ADVERTENCIAS

- ✔ No usar en presencia de anestésicos inflamables.
- ✔ No abrir ni modificar el dispositivo.
- ✔ No utilizar si presenta daño físico visible.
- ✔ No destinado para uso ocular.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONECTIVIDAD	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (más de 10 m en campo abierto)
BATERÍA	Litio 1500 mAh, más de 1.5 horas de uso continuo
INDICADORES LED	LED: Encendido, Wi-Fi y carga
BOTONES INTEGRADOS	Captura de imagen y grabación de video
RUEDA DE ENFOQUE	Ajuste de imagen de alta precisión.
ALIMENTACIÓN	USB 5VDC, 150 mA.
PROTECCIÓN	IPX0
PESO	113 g aprox.
DIMENSIONES	11.5 cm (largo) x 3.5 cm (alto) x 3.5 cm (ancho)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-20°C a +49°C
HUMEDAD MÁXIMA	95% sin condensación

