



MICROPOINT



Coagulómetro

SISTEMA DE MONITOREO

El sistema de monitoreo qLabs Plus se usa para la medición cuantitativa de PT/INR y APTT en muestras de sangre entera fresca, entera capilar o entera venosa. El sistema de monitoreo qLabs Plus está diseñado para el diagnóstico in-vitro.

Equipo fácil de usar, ligero y portátil, con una sola punción en el dedo brinda resultados en un tiempo de 2 a 7 minutos. Alta precisión con calidad de laboratorio, No requiere calibración ni manipulación del instrumento.

CUIDADOS:

- ✓ El qLabs® Vet es un instrumento delicado y debe manipularse con cuidado. Si el instrumento qLabs® Vet se cae o se usa indebidamente puede funcionar mal.
- ✓ Debe transportarse en un estuche paratransporte o en un recipiente de seguridad.
- ✓ NO se puede derramar líquido sobre el instrumento qLabs® Vet. Si se derrama líquido, contacte inmediatamente con el distribuidor.
- ✓ NO se debe guardar el instrumento qLabs® Vet a temperaturas inferiores.

CÓMO REALIZAR EL ANÁLISIS

- ✓ Debe usarse el instrumento qLabs® Vet sobre una superficie nivelada y sin vibraciones. Si se realiza el análisis sobre una superficie irregular o inestable se pueden obtener resultados incorrectos. NO sujete el instrumento qLabs® Vet en la mano durante el análisis.
- ✓ La muestra de sangre debe aplicarse a la tira reactiva justo después de su obtención. De lo contrario, la muestra de sangre puede empezar a coagularse, lo que causa resultados incorrectos.
- ✓ NO mueva ni toque el instrumento qLabs® Vet durante el análisis.

CÓMO OBTENER LA MUESTRA DE SANGRE

- ✓ Utilice solo sangre completa no anticoagulada y sangre completa con citrato. No utilice plasma.
- ✓ La gota de sangre debe ser de al menos 10 µl.
- ✓ Un rango de hematócritos de entre el 30 % y el 55 % no afectará a los resultados del análisis.

REQUISITOS DEL ENTORNO DE PRUEBA

- ✓ La temperatura debe mantenerse entre 10 °C y 35 °C.
- ✓ Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los requisitos de emisiones de EMC aplicables especificados en EN 55032. Las emisiones de la energía utilizadas son bajas y no es probable que causen interferencia en equipos electrónicos cercanos.
- ✓ No se debe utilizar este instrumento en un ambiente seco, especialmente si hay materiales sintéticos presentes. Ropa sintética, alfombras, etc. pueden presentar descargas estáticas nocivas en un ambiente seco. Eso puede causar un funcionamiento incorrecto o dañar el dispositivo. El rango de funcionamiento de humedad recomendado es del 10% al 90%.
- ✓ No utilice este instrumento cerca de teléfonos celulares o inalámbricos, walkie talkies, dispositivos para abrir puertas de garaje, transmisores de radio u otros equipos eléctricos o electrónicos que sean fuentes de radiación electromagnética, ya que pueden interferir con el correcto funcionamiento del instrumento.

